



CODAN Xtrans®

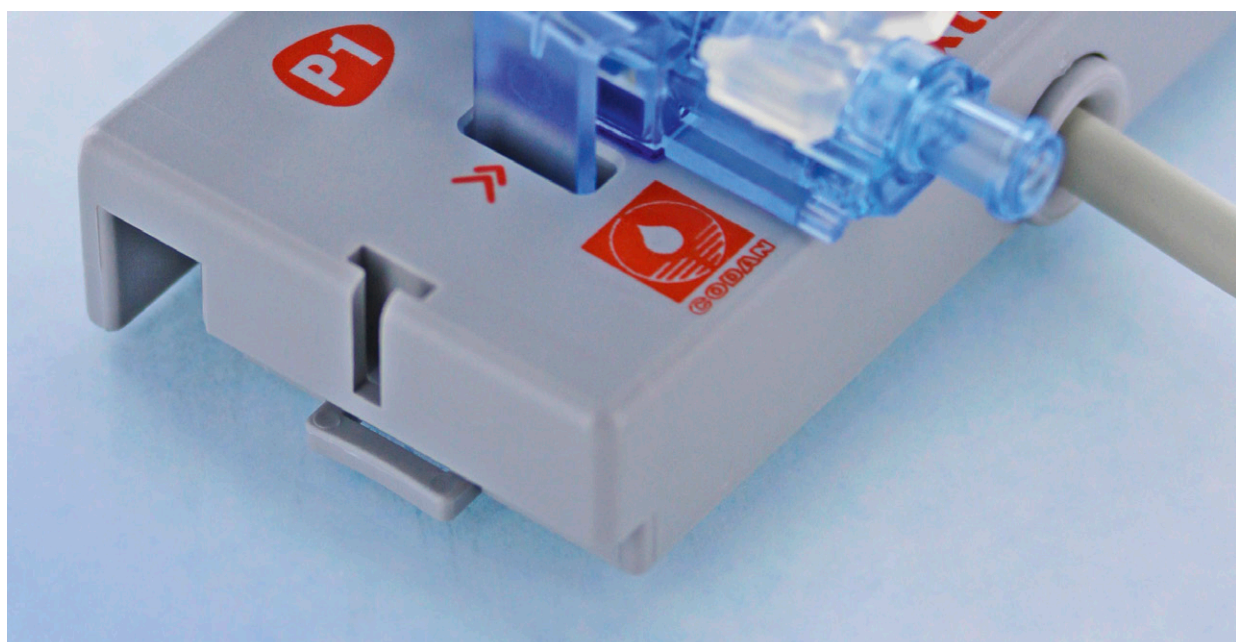

Il sistema intelligente per il
monitoraggio della pressione

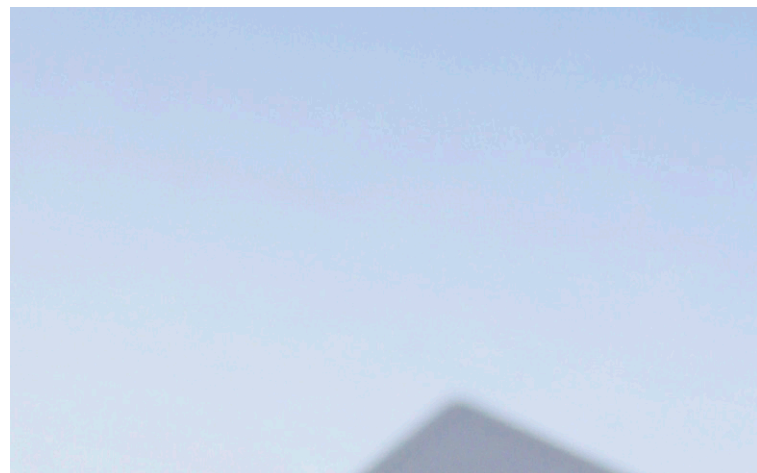

CODAN Xtrans®

Le soluzioni intelligenti semplificano la tecnologia

Sorprendentemente maneggevole


Il trasduttore Xtrans® viene inserito con un solo gesto sul pannello dei contatti, ed è pronto per l'uso! Contemporaneamente viene stabilita la connessione elettrica con il monitor. Semplicità nell'utilizzo combinata con un design ergonomico - questo è quello che distingue il sistema Xtrans®.

Contatto sicuro dal design unico

Oltre ad un inserimento facile e rapido del trasduttore Xtrans® al pannello dei contatti, Xtrans® fornisce un contatto straordinariamente sicuro. Il design speciale del contatto è resistente ai liquidi, prima e durante il priming.

Tecnologia + design = affidabilità

Il trasduttore Xtrans® è dotato di un sensore estremamente sensibile. Affinchè la pressione venga misurata senza distorsioni, il sensore è posizionato direttamente al di sotto del canale di flusso. Il canale di flusso laminare garantisce un riempimento e un risciacquo ottimale del sistema. Infatti solo un sistema completamente privo di aria garantisce quello che più conta: la misurazione precisa della pressione.

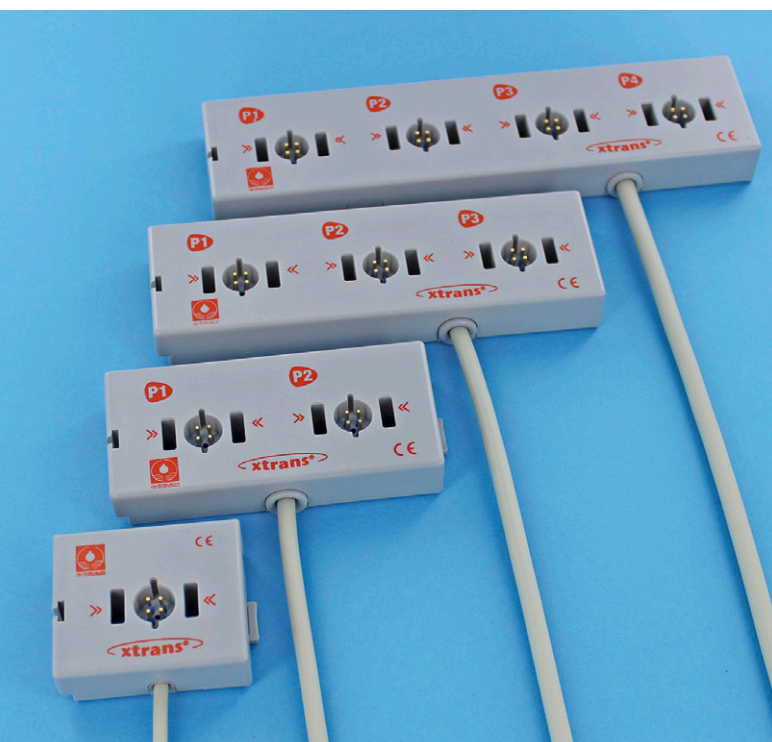

Xtrans® permette un lavoro economicamente conveniente

L'originale concezione del sistema Xtrans® permette l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali. Sono stati eliminati tutti i componenti superflui: niente cavi per il trasduttore e niente piastre di supporto aggiuntive. Il risultato: Xtrans® pesa solo 12 grammi.

Il sistema

La rivoluzionaria innovazione nel monitoraggio invasivo della pressione sanguigna - semplice, sicura, conveniente.

Quando si tratta di precisione, niente compromessi

Il sistema Xtrans® comprende sia componenti monouso che componenti riutilizzabili.

I componenti monouso assicurano la sterilità e il rilevamento preciso del segnale in tutti gli ambiti di pressione.

I componenti riutilizzabili sono fatti di materiali molto robusti e di altissima qualità e assicurano al sistema Xtrans® una lunga durata.

Xtrans® - quando i componenti riutilizzabili servono veramente.




Configurazione professionale del sistema

A seconda della misurazione della pressione, singola o multipla, sono disponibili pannelli dei contatti da 1 a 4 trasduttori. Non è necessario comporre più pannelli ed è quindi possibile realizzare delle unità robuste e compatte.

Indipendentemente dall'utilizzo di un pannello singolo o multiplo, c'è sempre un unico cavo collegato al monitor. Nessun cavo d'interfaccia individuale.

Il cavo del pannello dei contatti si collega al monitor tramite un cavo di connessione singolo, doppio, triplo o quadruplo.

Il cavo di connessione può restare permanentemente allacciato al monitor. Sarà così possibile collegare il pannello dei contatti a qualsiasi tipo di monitor.

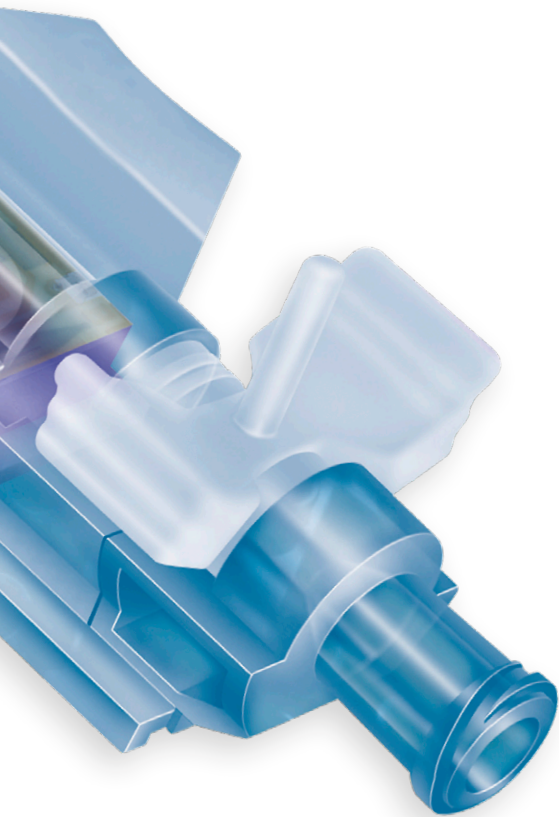

Pannello dei contatti xxs per applicazioni particolari

Il pannello dei contatti xxs è destinato ad usi che richiedono peso e dimensioni particolarmente ridotti - è ideale per il fissaggio al braccio del paziente.

CODAN nel mondo



CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

CODAN Le linee dei prodotti

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Prolunghe e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per uso neonatale e pediatrico
- Set di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Siringhe monouso
- Sistemi invasivi di monitoraggio della pressione sanguigna
- Pompe da infusione
- Altri prodotti CODAN

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany
Tel. +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbccc.de · www.codancompanies.com

The decisive connection